

Figyelmeztetések

Minden művelet megkezdése előtt vizuálisan ellenőrizze a készülék sértetlenségét. Ha a termék rendellenességeket mutat, vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával.

A használatra való előkészítést szakképzett személyzetnek kell elvégeznie, aki a beteg igényeinek megfelelően állítja be a különböző beállításokat.

Az Intermed Ltd. nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatáért.

Javallatok és leírások

Két kézzel használható járást segítő eszköz beltéri és kültéri használatra.

- Összecsukható, festett acélváz.
- Forgó első kerekek.
- Rögzített hátsó kerekek.
- Merev ülés.
- Magasságban állítható, ergonómikus fogantyúk.
- Parkoló fékek.
- Fém kosár 9 kg teherbírással.
- Műanyag tálca.
- Sétabot tartó.



Műszaki adatok

Teljes szélesség	590 mm
Ülés szélessége	420 mm
Ülésmagasság	610 mm
Magasság fogantyúk	785–930 mm
Kerekek átmérője	200 mm
Kerék vastagsága	50 mm
Súly	9,1 kg
Maximális terhelhetőség	120 kg

Szerelési utasítás

- Helyezze be a fogantyúkat és állítsa be a kívánt magasságra, ügyelve arra, hogy a reteszelő karok kívülre és lefelé nézzenek.
- Válassza szét a rollator lábait, és enyhén nyomja lefelé, amíg az ülés alatti reteszelő teljesen be nem rögzül.
- Helyezze a fém kosarat a kampókra.
- Végül helyezze be a műanyag tálcat.
- A bezáráshoz oldja ki és emelje fel az ülésfelület alatti rudat.


Általános használati óvintézkedések

- Ellenőrizze, hogy a fogantyúk megfelelően vannak-e hátrafelé irányítva, és hogy külsőleg nem állnak ki a rollator alakjából. Ellenőrizze, hogy a fogantyúk a szükséges munkamagasságra vannak-e beállítva, és minden esetben a krómozott csövek recézett részén túlra nyúlnak-e. Végül győződjön meg arról, hogy a rögzítőkarokkal biztonságosan vannak-e rögzítve.
- Ne használja a készüléket egyenetlen felületeken, és különös figyelmet fordítson a függő felületeken való használatra.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a fékek működését, és ha szükséges, állítsa be őket a fogantyúban és a kábel közepén található állítócsavarokkal.
- Mindig fékezzen, amikor a készülék ülésére ül.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a retesz biztonságosan zárva van-e az ülés szintje alatt.
- Figyeljen a keret általános stabilitására.


Karbantartás és tisztítás

- Minden használat után távolítsa el a szennyeződések nem agresszív tisztítószerrel, és gondosan szárítsa meg.
- Ne használjon súrolószivacsot.
- Rendszeresen ellenőrizze a fékek működését.
- Rendszeresen ellenőrizze a szorosságot és a hegesztési varratok tömítőképességét.
- Ellenőrizze a kerekek kopását, a villákhoz való rögzítésüket, és tisztítsa meg a csapok környékét.
- Cserealkatrészek vagy pótalkatrészek beszerzéséhez mindig forduljon a kereskedőjéhez.

A fékek használata

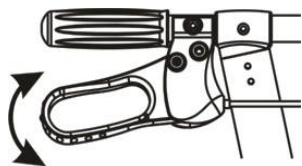

1. ábra

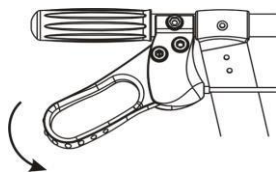

2. ábra

- A lassításhoz vagy fékezéshez húzza fel egyszerre a fékkarokat. A mozgás folytatásához engedje el a karokat (1. ábra).
- A rögzítőfék bekapcsolásához nyomja le mindkét fékkart, amíg azok reteszelődnék. A fékbevet bekapcsolását egy kattánás jelzi (2. ábra).

A hulladékkezelés módja

A készüléket a vonatkozó környezetvédelmi és hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Garancia

A készülékre 24 hónapos gyártási garancia vonatkozik, kivéve a gondatlanságból vagy karbantartás elmulasztásából eredő meghibásodásokat. A garancia nem vonatkozik az Intermed srl előzetes hozzájárulása nélkül módosított vagy javított termékekre. A garancia nem vonatkozik a kopásnak kitett alkatrészekre.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Rev. 00, 2021. augusztus

ROLLATOR NEW ROMA RA-150



Megfelel az EU 2017/745 rendeletnek, amelyet az EU 2020/561 rendelet módosított.



Kínában gyártva



INTERMED
Medical Solutions and Devices

via Ludovico D'Aragona, 11 -20132 Milano (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
w w w .intermeditalia.it • info@intermeditalia.it